

## KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

### Hoening Duet -yhdistelmäpyörä

Duet-yhdistelmäpyörän pyörätuoliosa on helposti irroitettavissa toimivaksi pyörätuoliksi. Duet soveltuu lapsille ja aikuisille, jotka eivät itse kykene osallistumaan pyörän hallintaan tai polkemiseen. Apumoottorin hallintalaitteet ovat ohjaustangossa.

Istuinosaa voidaan tukityynyin ja lisävarustein muokata sopivaksi pienikokoisellekin käyttäjälle. Istuinosassa on nelipistevyöt. Istuimen selkänöjan kallistus on säädettävissä.



Istuimen mitat		Yhdistelmäpyörän mitat	
Syvyys	40 cm	Pituus jalkatuella	267 cm
Leveys	46 cm	Pyörän leveys	66 cm
Selkänöjan korkeus	56 cm	Paino	65 kg
		Maksimikuorma	250 kg

# Käyttöönotto

- ! Pidä hieman painoa pyörän takaosan päällä etuistuimeen nousun aikana ja istuimesta noustessa. Pyörä muuttuu etupainoiseksi siirtymisen aikana ja voi kaatua. Älä astu jalkalaudan päälle koko painolla.

Yhdistelmäpyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Laturin merkkivalot ilmaisevat milloin akku on täynnä.

## Pyörätuoliosan irrottaminen



Irroita ensin kaapelit. Kuvaan merkityistä kaapeleista on irroitettava vasemman- ja oikeanpuolimmainen. Vasen pistoke irtoaa kiertämällä pistokkeen metallinen osa ensin auki ja vetämällä pistoke sitten ulos. Oikeanpuoleisessa pistokkeessa on lukitusvipu alapuolella. Vedä sormella vipua taaksepäin ja kierrä pistoketta aukipäin.

Avaa rungon salpa. Käännä vipu kokonaan auki jotta salpa irtoaa.

Pidä kiinni rungon takaosasta, ettei se pääse kaatumaan. Nosta runkoputkea hieman irrottaaksesi pyörän osat toisistaan.

## Latauspistoke

Latauspistoke on pyörätuoliosan takana. Irroita pyörän virtajohto akusta painamalla pistokkeen oikealla puolella olevaa pientä metallista nappia. Aseta laturin pistoke virtajohton tilalle. Laturin merkkivalot ilmaisevat latauksen tilan. Akku latautuu vihreän valon palaessa.

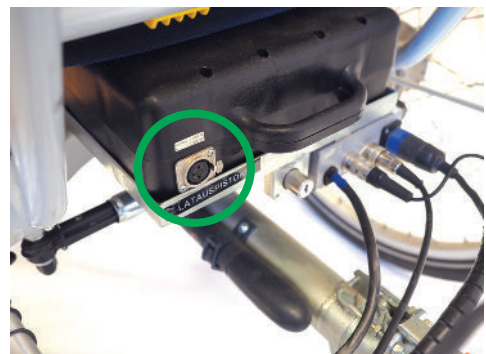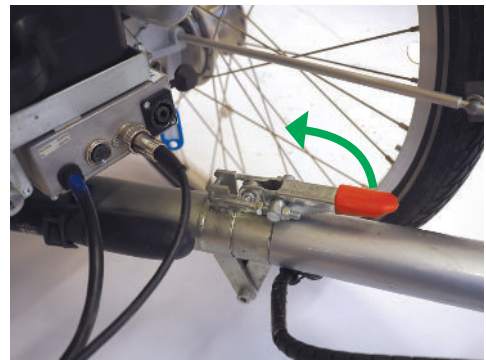

### Päävirtakytkin

Varmista sähköistä avustinta käytettäessä, että päävirtakytkin on asetettu "ON"-asentoon. Pyörässä on myös kytkin ohjaustangossa, mutta se on asetettu valmiiksi "ON"-asentoon.



### Ohjaustangon korkeus

Löysää kuvaan merkityt neljä kuusiokoloruuvia (5 mm) kummaltakin puolelta ja säädä sopiva korkeus. Kiristä ruuvit.




### Istuimen selkänojan kulma

Selkänojan kulmaa voidaan säätää avaamalla istuimen pikalukot. Vedä tappi ulos ja käännä sitä hieman. Toista sama toiselle puolelle ja säädä sopiva kulma. Kierrä tappeja, jolloin ne lukittuvat uudestaan. Varmista, että selkänoja on lukittunut liikuttamalla sitä käsin.




### Satulan korkeus

Avaa satulan lukitus kuvan kahvasta. Säädä sopiva korkeus ja kiristä lukitus.

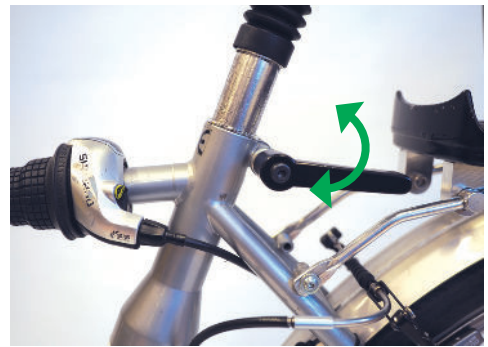

### Jalkalaudan korkeus

Löysää kuvan kuusiokoloruuvit(5mm) jokaisesta kiinnikkeestä. Säädä sopiva korkeus ja kiristä ruuvit.

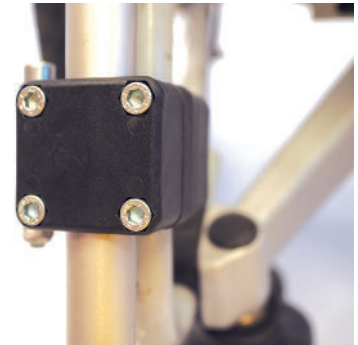

### **Turvavyöt**

Nelipistevyöt kiinnitetään pistolukolla. Säädä vöihin sopiva kireys.



### **Käsijarru**

Pyörän käsijarru on käytettävissä molemmilla käsillä. Purista alemmaa kahvaa ylöspäin jarruttaaksesi.



### **Seisontajarru**

Lukitse seisontajarru ohjaustangossa olevalla lenkillä. Purista jarrua voimakkaasti ja käännä jarrukahva lenkissä olevaan loveen.



### **Manuaalivaihteet**

Manuaalivaihteita käytetään satulan alla olevasta kahvasta. Kierrä kahvaa vaihtaaksesi vaihteita. Voit polkea vaihteita vaihtaessasi.



Apumoottori ei ole tarkoitettu jatkuvasti käytettäväksi, vaan avuksi esimerkiksi ylämäissä ja liikkeellelähdöissä. Apumoottoria käytetään ohjaustangon kaasukahvasta, pyörää on kuitenkin poljettava samanaikaisesti.

### **Kaasukahva**

Apumoottoria käytetään ohjaustangon kaasukahvaa kiertämällä.

