



MALIKE

matkalle, liikkeelle, keskelle elämää

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE SNOW COMFORT -KELKKA

Snow Comfort on tukeva, muovinen kelkka loivaan pulkkamäkeen sekä lumella ja jäällä liikkumiseen.

Kelkkaa voi työntää työntökahvasta ja/tai vetää kelkan keulassa olevasta veto-
narusta. Snow Comfort -kelkassa on niskatuki ja sivutuet. Molemmilla sivuilla
on jarrukahvat. Lisäksi kelkassa on avustajalle erillinen seisonta-alusta, jossa on
jarru. Kelkan voi tarvittaessa varustaa erillisillä vetoaisoilla, jolloin sitä voi
vetää perässä hiihtoladulla tai lumikenkätienkällessä.



Kelkka koostuu:

- Kelkkaosasta
- Työntökahvasta
- Seisonta-alustasta
- Turvavöistä
- Niskatuesta

Käyttäjän maksimipaino 90 kg

Kelkan kasaamiseksi on kiinnitet-
tävä 2 siipimutteria, 1 sormiruuvi
ja 1 sokka.

**Huomioithan, että seisonta-alusta
rikkoontuu helposti, jos avustaja oh-
jaa kelkkaa kallistamalla tai jarruttaa
kovassa vauhdissa kovalla alustalla!**



Snow Comfort -kelkka voidaan
purkaa kasaan kuljetusta varten.
Selkänoja voidaan irroittaa, käsi-
noja laskea eteen alas ja seisonta-
alusta nostaa istuimen päälle.



Purkamista varten kelkan työn-
tökahvan siipimutterit ja työntö-
kahvan ja käsinojan sormiruuvi
on irroitettava. Huomioi, että
käsinoja tulee työntökahvan
taakse.



Seisonta-alusta kiinnitetään
sokalla kelkan alla olevaan put-
keen.

Malike
Sumeliuksenkatu 18 B, 3 krs
33100 Tampere

Puh. 0206 90 282
www.malike.fi
malike@kvttl.fi

